

福祉用具の活用で自立支援、
安全・安心な介護の実現

ABILITIES
アビリティーズ
Since 1966
<https://www.abilities.jp/>

低い段差は これひとつで素早く解消 取付けも、取外しもラクラク

低段差解消 クイックスロープ

- シールで貼付けて固定するだけ。4mm、6mm、8mm、10mm、12mm の段差を簡単に解消。
- シールですので床を傷つけずに固定が可能です。フローリング、クッションフロアに最適。
- 取付用パッドはシール貼付のほか、ネジ固定も可能。
- 幅はどれも 1,000mm。カッターやのこぎりでカットして調節。



■ 2t の荷重にも耐える
ことができます。



取付方法



■ 段差を測り、同じ高さのクイックスロープをお買い求めください。



■ 接着部の埃や油分よく拭き取ってください。




■ 4mm、6mm、8mm の場合は取付用テープで床に本品を貼り付けます。




■ 10mm、12mm の場合は取付用パッドを最初に固定します。



■ その後、スロープの凹部とパッドの凸部を合わせて固定します。

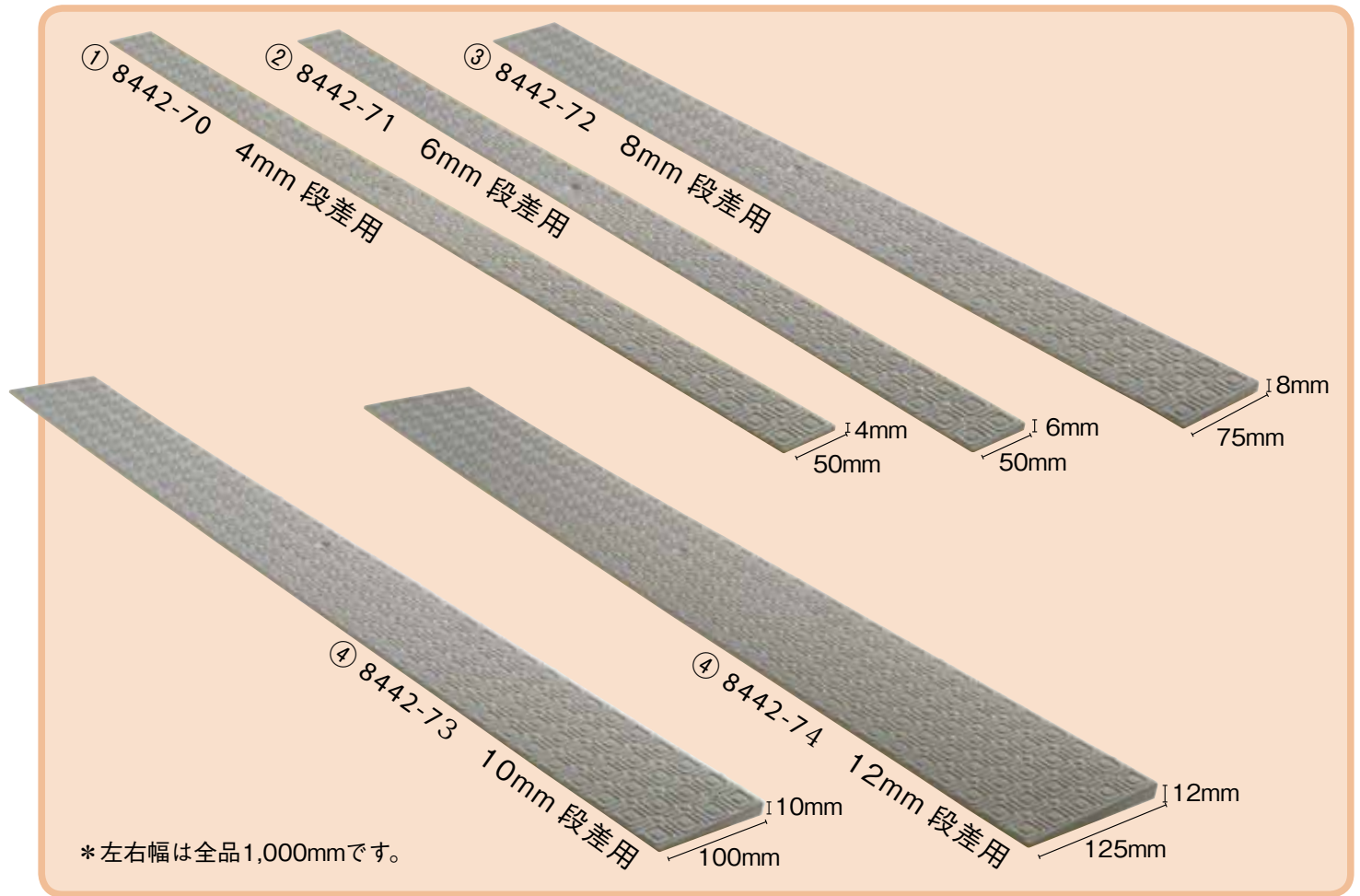

▲取付用テープ

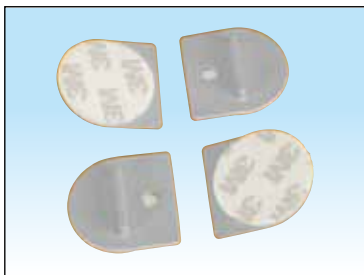

▲取付用パッド

商品番号	適応段差 / 取付用テープ・パッド付属数	価格(税抜)
① 8442-70	4mm / 取付用テープ 4 枚付	¥2,800
② 8442-71	6mm / 取付用テープ 5 枚付	¥3,500
③ 8442-72	8mm / 取付用テープ 5 枚付	¥4,000
④ 8442-73	10mm / 取付用パッド 4 枚付	¥4,900
⑤ 8442-74	12mm / 取付用パッド 4 枚付	¥5,400

▼交換用取付テープ/パッド

商品番号	内容物	価格(税抜)
8442-85	取付用テープ 5 枚入り	¥950
8442-84	取付用パッド 4 枚入り	¥1,000

※接着テープまたはネジでしっかりと固定できる平坦な床でお使いください。

●材質/低密度ポリエチレン (PE-LD)

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>
 (無料通話) やさしいようぐを
0120-834490

アビリティーズ・ケアネット株式会社
 [本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

[営業所] 札幌市/仙台市/栃木市/川口市/渋谷区/葛飾区/武蔵野市/府中市/八王子市/千葉市/船橋市/横浜市青葉区/横浜市南区/平塚市/松本市/佐久市/新潟市/名古屋市/金沢市/大阪市/和泉市/西宮市/神戸市/福山市/広島市/北九州市/福岡市/台北市(台湾)

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
 ※掲載価格には消費税は含まれておりません。 ※このチラシの記載内容は2017年8月のものです。 ※禁無断転載・複写